

По рекомендациям врача-рефлексотерапевта аппликатор можно фиксировать на БАТ с целью влияния на внутренние органы через соответствующие акупунктурные каналы. Время воздействия аппликатора – от 30–60 минут до 12 часов в день. После применения аппликатора в течение 5–6 дней рекомендуется однодневный перерыв. Курс лечения повторяют 3–4 раза до полного купирования боли или устранения дискомфортных ощущений. Важно не носить аппликатор непрерывно, так как организм привыкает к его действию и лечебная эффективность снижается.

Аппликатор «БИМАГ» совместим с лекарственной терапией, гомеопатией и фито-терапией.

#### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

**ВНИМАНИЕ!** Не использовать аппликатор людям с кардиостимулятором или другими электронными приборами в организме. Не рекомендуется использовать при беременности, детям до двух лет, людям со склонностью к кровотечениям. Действие магнитов носит индивидуальный характер, поэтому результаты применения зависят от особенностей организма и могут различаться.

Изделия с постоянными магнитами следует оберегать от ударов о другие предметы, не бросать, не оставлять летом в машине или на солнце.

Не рекомендуется хранить ближе 10 см от аппликатора точные приборы (механические и электромеханические часы), аудио/видео кассеты, дискеты, банковские и др. магнитные карты во избежание размагничивания последних.

## ПАСПОРТ

#### КОМПЛЕКТНОСТЬ

Аппликатор «БИМАГ» ..... 1 шт.  
Руководство по эксплуатации ..... 1 шт.  
Потребительская тара ..... 1 шт.

#### УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Транспортирование аппликаторов «БИМАГ» любым видом транспорта, обеспечивающим защиту от влаги и низких (ниже минус 25°С) температур.

#### ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует потребителю соответствие параметров и характеристик устройства-аппликатора магнитостимулирующего «БИМАГ» требованиям ТУ 9444-001-11153066-94 при соблюдении потребителем требований, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации.

Гарантийный срок – 24 месяца со дня продажи, а при отсутствии отметки о продаже – со дня изготовления.

Гарантия на эластичный шнур не распространяется.

Срок службы аппликатора – пять лет. Критерием предельного состояния аппликатора является несоответствие требованию по величине индукции магнитного поля на рабочих по-верхностях, что не нарушает требований по безопасности.

Для принятия решения о возможности применения аппликатора после окончания срока службы рекомендуется получить заключение сервисного центра предприятия-изготовителя о величине индукции магнитного поля на рабочих поверхностях аппликатора.

Все вопросы, связанные с продажей товара и исполнением изготовителем (продавцом) гарантийных обязательств, регулируются в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителя».

#### ГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСЛЕГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Гарантийный и послегарантийный ремонт осуществляет предприятие-изготовитель:

**ООО НПФ «НЕВОТОН», Россия, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Грибакиных, д. 25, корп. 3. Тел.: (812) 327-46-96.**

#### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройство-аппликатор магнитостимулирующий «БИМАГ» изготовлен и принят в соответствии с требованиями ТУ 9444-001-11153066-94 и признан годным к эксплуатации.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора  
ФСР 2011/10100 от 11.02.2011 г.



#### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО НПФ «НЕВОТОН»  
Россия, 192012, Санкт-Петербург,  
ул. Грибакиных, д.25, корп. 3.  
[www.nevoton.ru](http://www.nevoton.ru)




**УСТРОЙСТВО- АППЛИКАТОР  
МАГНИТОСТИМУЛИРУЮЩИЙ**

**ЭФФЕКТИВНО**

**ПРОСТО**

**НАДЕЖНО**

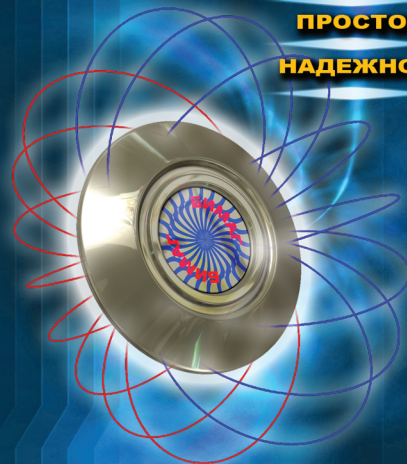

## ИНСТРУКЦИЯ по применению устройства-аппликатора магнотимулирующего и гармонизирующего БАТ и БАЗ «БИМАГ»

### НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство-аппликатор магнотимулирующий «БИМАГ» (далее – аппликатор) – это источник постоянного магнитного поля, который оказывает стимулирующее действие на организм и корректирует его функциональное состояние.

Аппликатор предназначен для индивидуального применения в домашних условиях для продолжительного воздействия на биологически активные зоны (БАЗ) и биологически активные точки (БАТ) слабым магнитным полем. Может применяться как терапевтическое и профилактическое средство в стационарных, амбулаторных и домашних условиях.

### УСТРОЙСТВО АППЛИКАТОРА

Аппликатор выполнен в виде неразборного металлического диска, внутри которого находится специально обработанный ферромагнитный материал – источник постоянного магнитного поля.

Для крепления на теле в конструкции аппликатора применяется эластичный шнур. Максимальное значение индукции постоянного магнитного поля на поверхности капсулы 8,4–12,0 мТл.

### ПРИНЦИП ЛЕЧЕБНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Аппликатор, являясь источником постоянного магнитного поля малой напряженности, обеспечивает коррекцию регуляторных процессов в организме за счет восстановления естественной поляризации клеток и тканей, улучшая их кровоснабжение и стимулируя обменные и питательные процессы.

Магнитное поле аппликатора, воздействуя на капиллярную систему, увеличивает кровоток, благодаря чему снижается нагрузка на сердце.

Аппликатор создает эффект привыкания к нему организма. Это важное обстоятельство, требующее периодичности (хотя бы раз в неделю) прерывать применение аппликатора на 12–24 часа.

### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- беременность (любой срок);
- острые инфекционные заболевания и лихорадочные состояния неясной этиологии;
- острые нарушения мозгового и коронарного кровообращения (острый инсульт, инфаркт);
- заболевания, связанные с нарушением свертываемости крови (острые тромбозы вен и артерий);
- системные заболевания крови;
- психические заболевания в стадии обострения;
- применение аппликатора во время приема электролечения;
- индивидуальная непереносимость;
- наличие имплантированного кардиостимулятора;
- онкологические заболевания.

### ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Аппликатор может применяться для лечения, реабилитации и профилактики при:

- неврологических и нервно-психических расстройствах
- болевые синдромы
- вегетативные расстройства
- повышенная утомляемость
- головные боли
- стрессовые состояния, невроты
- нарушения трофики тканей
- заболеваниях опорно-двигательного аппарата
- остеохондрозы
- артриты, артрозы
- обменные полиартриты
- миозиты
- гипертонической болезни I-II стадии
- вегето-сосудистой и нейроциркуляторной дистонии.

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

На теле человека аппликатор фиксируется с помощью эластичного шнура. Аппликатор рекомендуется располагать на участке

тела, максимально приближенного к проекции пораженного органа или источнику боли (см. рисунок 1). При функциональной патологии сердечно-сосудистой системы, невротических расстройствах аппликатор рекомендуется размещать как медальон на уровне нижней края грудины (зона VC 18).

При различных заболеваниях мы рекомендуем следующие точки крепления аппликатора:

- ① – головные боли;
- ② – невралгии, стрессовые состояния;
- ③ – заболевания сердечно-сосудистой системы;
- ④ – гипертоническая болезнь I-II стадии;
- ⑤ – боли в области спины.

При радикулитах и заболеваниях опорно-двигательного аппарата капсулу аппликатора необходимо располагать в местах острых болей.

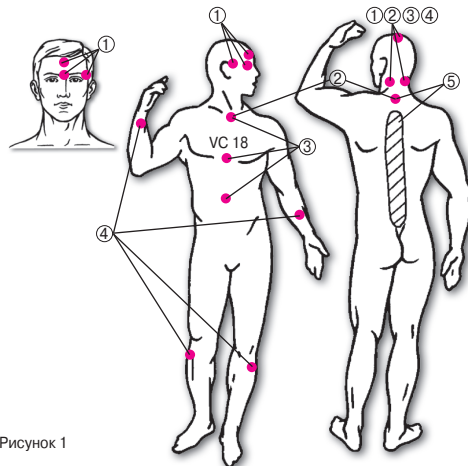


Рисунок 1

## ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ Устройство-аппликатор магнотимулирующий «БИМАГ»

Товар получен без видимых повреждений, проверен в моем присутствии, претензий по внешнему виду и комплектности не имею.

С гарантийными условиями, показаниями и противопоказаниями ознакомлен.

Подпись покупателя: \_\_\_\_\_

Дата: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

----- Заполняется продавцом -----

Дата продажи: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Продавец  
(подпись) \_\_\_\_\_

Штамп торгового предприятия: \_\_\_\_\_